

Camera Drape

密閉式カプラーカメラドレープ

ビデオカメラシステムを連続して使用できる

洗浄滅菌に回さないで、高価な器材はいつも目の届く場所に

カメラ、スコープの機種を問わず使用でき、
複数種類の硬性鏡を術中にすばやく清潔に交換できます

★取付け方を動画でご覧いただけます！

[coupler drape youtube](#)

検索





清潔な看護師がドレープの中に手を入れスティックをつかみます。



清潔な看護師がスティックをつかんだ状態で、外回り看護師がカバーを取り付けます。



カメラのアタッチメントにしっかり接続されていることを入念に確かめます。



外回り看護師がドレープのつまみを引き、カメラとケーブルにドレープを被せます。



清潔な看護師が突起部分を押し、ロックを解除し、スティックを外して取り除きます。



突起部分を押し、ロックを解除し、スコープを取り付けます。ロックを解除すれば、術中に何回でもスコープを交換できます。



- 不潔エリアと清潔エリアが完全に分けられているため、術中にすばやく清潔に硬性鏡を交換できます。
- カメラやスコープの機種を問わず使用できます。
- 滅菌処理によるカメラの損傷を防ぎ、修理費に頭を悩ませることはありません。
- 曇り防止加工レンズを採用することにより高解像度を維持します。


密閉式カプラーカメラドレープ

品番	9907
税抜き定価	¥ 24,000
1枚当たり	¥ 2,400
仕様	H18×L246cm (10枚入り/箱)

○先端をミシン目で切り取るタイプ

カメラドレープ

品番	C5108
税抜き定価	¥ 40,000
1枚当たり	¥ 1,600
仕様	H23×L244cm (25枚入り/箱)

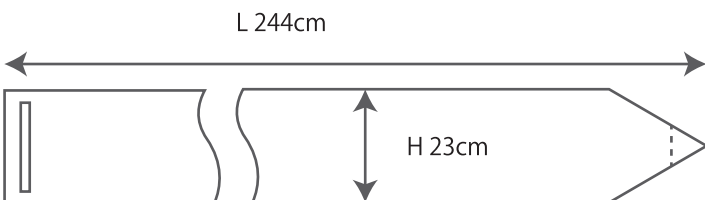

YouTube

C5108 装着方法

